

# ompro<sup>®</sup> FD 7 Flächendesinfektion

## alkoholische Schnelldesinfektion, gebrauchsfertig

Stand: 21.08.2020

### Eigenschaften

- Bakterizid inkl. MRSA, levurozid
- Tuberkulozid
- begrenzt Viruzid
- Parfümfrei

Gebrauchsfertige flüssige alkoholische Schnelldesinfektion. Zur Schnelldesinfektion und Reinigung aller alkoholbeständigen Oberflächen.

### Anwendung / Dosierung

Für die Flächenwischdesinfektion eine ausreichende Menge auf ein geeignetstes Einmaltuch geben und die Oberflächen damit abwischen. Die Oberflächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig mit dem Desinfektionsmittel benetzt sein. Starke Verunreinigungen sind zunächst mit einem Desinfektionsmittelgetränkten Einmaltuch zu entfernen. Anschließend kann die Desinfektion mit ompro<sup>®</sup> FD 7 Flächendesinfektion erfolgen. Nach Ablauf der Einwirkzeit können die Oberflächen mit einem sauberen Einmaltuch trocken nachgewischt werden.

Hinweis: Für alle alkoholbeständigen Oberflächen geeignet. Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA).

Wirkspektrum und Einwirkzeiten:

Bakterizid gem. DIN EN 1276 - 30 Sek.

Levuroid gem. DIN EN 1650 - 30 Sek.

Begrenzt Viruzid (behüllte Viren) gem. DIN EN 14476 - 30 Sek.

### Inhaltsstoffangabe

Zusammensetzung: 100 g enthalten als Biozid wirksamen Bestandteil 47,1 g Propan-2-ol und 8 g Ethanol. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. BAuA Reg.-Nr.: N-97352.

### Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	nicht relevant
Dichte:	0,888 g/cm <sup>3</sup>

# ompro<sup>®</sup> FD 7 Flächendesinfektion

alkoholische Schnelldesinfektion, gebrauchsfertig

Stand: 21.08.2020

---

## Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Flamme; Ausrufezeichen

Entz. Fl. 2; Augenreiz. 2; STOT einm. 3

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

## Lagerhinweise

Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Gebinde.